

Informationen zum Gebrauch des Produktes

Einmal Gesichtsmaske - ECT A011037 / A011038
Typ IIR Mund-Nasen-Schutzmaske

Verwendungszweck:

Die Maske ist zur Verwendung in allen medizinischen und nicht-medizinischen Bereichen geeignet. Sie kann von medizinischem Personal eingesetzt werden.

Typische Anwendungsbereiche:

OP Bereiche, Pflegedienste, Labore, Pflegeheime, Versorger, Apotheken, Lebensmittelindustrie, usw.

Die Masken sind nicht geeignet zum Tragen beim Leistungssport oder dauerhaft schweren körperlichen Arbeiten.

Die Masken sind Gesichtsmasken zum Einmal-Gebrauch und sollen nach dem Gebrauch fachgerecht entsorgt werden.

Die Masken sind nicht waschbar und nicht wiederverwendbar.

Prüfung

Die Maske wurde von Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG nach der Norm DIN EN14683:2019-10 geprüft und für den Anwendungsbereich (Typ IIR) bestätigt. Prüf-Endnummern: 0843 / 0848 - Juli 2020

Aufsetzen der Maske:

Setzen Sie die Maske mit dem farbigen Vlies außen und dem Nasenbügel oben durch Auseinander ziehen der Falten in der Mitte auf. Klemmen Sie die Ohrbänder beidseitig hinter die Ohren. Die Maske muss bis an den Nasenansatz unter die Augen reichen und wird mit dem Nasenbügel der Nasenform angepasst. Sie deckt so Nase und Mund vollständig ab.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns bitte: info@ect-solutions.de

Herstellungsort: Großostheim (Bayern), Deutschland
Lagertemperatur bei 20°C - 30°C / 3 Jahre ab Herstellungsdatum